

【手術日】

【施設名】




# RECELLプランニングシート

患者様のニーズに合った適切なRECELLの使用にお役立てください

①RECELLで治療する箇所を決定

②各治療箇所に必要な採皮面積と自家細胞懸濁液の量を計算

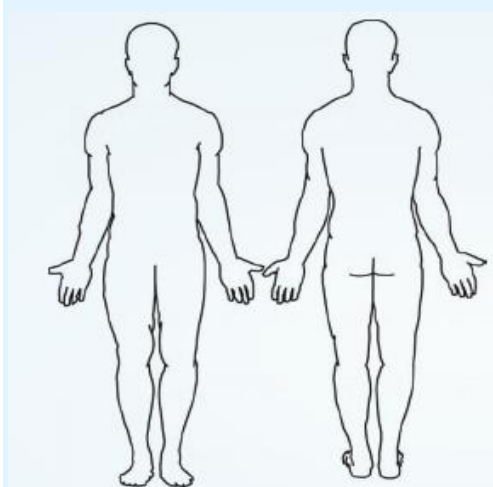

	治療部位	RECELL適用	長さ (cm)	幅 (cm)	治療部位 面積 (cm <sup>2</sup> )	RECELL採皮面積 (cm <sup>2</sup> )
			-	-	(長さ×幅)	(治療部位面積÷80)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
<b>合計</b>						

③算出された採皮面積を元に、必要な皮膚サイズ、枚数、RECELL使用数を確認

治療面積 (cm <sup>2</sup> )	160	320	480	640	1440	1920	2400	2880	3360	3840	4320	4800	5280	5760
RECELL使用採皮部 (cm <sup>2</sup> )	2	4	6	8	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
細胞懸濁液 (ml)	2	4	6	8	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
皮膚サイズ (cm <sup>2</sup> ) と枚数	1片 2x1	1片 2x2	1片 3x2	2片 2x2	3片 3x2	4片 3x2	5片 3x2	6片 3x2	7片 3x2	8片 3x2	9片 3x2	10片 3x2	11片 3x2	12片 3x2
1920 必要数	1セット						2セット			3セット				
640 必要数	1セット													

【手術日】

【施設名】




# RECELLプランニングシート（記入例）

患者様のニーズに合った適切なRECELLの使用にお役立てください

①RECELLで治療する箇所を決定

②各治療箇所に必要な採皮面積と自家細胞懸濁液の量を計算

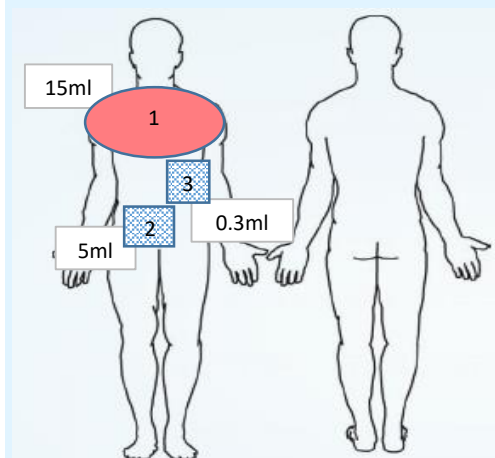

例	治療部位	RECELL適用	長さ (cm)	幅 (cm)	治療部位 面積 (cm <sup>2</sup> )	RECELL採皮面積 (cm <sup>2</sup> )
			-	-	(長さ×幅)	(治療部位面積÷80)
1	前胸部	治療部位	40	30	1,200	15.0
2	腹部	植皮採皮部 (3倍)	20	20	400	5.0
3	側腹部	RECELL採皮部	-	-	20	0.3
<b>合計</b>					<b>1,620</b>	<b>20.3</b>
1						
2						
3						
4						
5						
6						
<b>合計</b>						

③算出された採皮面積を元に、必要な皮膚サイズ、枚数、RECELL使用数を確認

治療面積 (cm <sup>2</sup> )	160	320	480	640	1440	1920	2400	2880	3360	3840	4320	4800	5280	5760	
RECELL使用採皮部 (cm <sup>2</sup> )	2	4	6	8	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	
細胞懸濁液 (ml)	2	4	6	8	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	
皮膚サイズ (cm <sup>2</sup> ) と枚数	1片 2x1	1片 2x2	1片 3x2	2片 2x2	3片 3x2	4片 3x2	5片 3x2	6片 3x2	7片 3x2	8片 3x2	9片 3x2	10片 3x2	11片 3x2	12片 3x2	
1920 必要数	1セット					2セット					3セット				
640 必要数	1セット														